

FAQ – Begleitbett Clipper

ALLGEMEIN

1. Was ist das Clipper-Begleitbett und welchem Zweck dient es?

+ Das Clipper-Begleitbett ist ein klappbares, besonders stabiles und gleichzeitig leicht zu bedienendes Begleitbett. Es dient dazu, Angehörigen das Übernachten direkt beim Patienten zu ermöglichen – sowohl im Krankenhaus als auch in anderen Betreuungssituationen.

2. Wo werden Clipper-Betten eingesetzt?

+ Clipper-Betten werden vor allem in Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeeinrichtungen eingesetzt, da sie für den professionellen Klinikbetrieb ausgelegt sind. Darüber hinaus eignen sie sich auch für Hotels oder Ferienunterkünfte, wenn eine flexible und hygienische Schlaflösung für Begleitpersonen benötigt wird.

3. Bietet provita auch Matratzen für die Betten an?

+ Ja, wir bieten verschiedene Matratzen für individuelle Schlafpräferenzen an. Daher ist die Matratze nicht im Lieferumfang des Clipper-Bettes enthalten, sondern kann je nach Wunsch als zusätzliche Position mitbestellt werden.

4. Welche Arten von Matratzen sind verfügbar und wie unterscheiden Sie sich?

+ Es gibt zwei Varianten: Kaltschaum-Matratzen, die besonders formstabil, langlebig und angenehm fest sind, und Visco-Matratzen, die sich durch Memory-Foam-Eigenschaften an die Körperform anpassen und eine druckentlastende Lage ermöglichen. Beide Versionen sind für Allergiker geeignet und bis 95 °C waschbar.

5. Können Matratzen von anderen Herstellern verwendet werden?

+ Nein, es dürfen ausschließlich vom Hersteller freigegebene Matratzen verwendet werden. Fremdmatratzen können beim Zusammenklappen zu unzulässigen Spannungen führen und stellen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.

6. Können Ersatzteile bei provita angefragt werden?

+ Ja, Ersatzteile wie Rollen, Spanngurt-Sets oder Endkappen können angefragt werden und sind direkt über Provita erhältlich

FAQ – Begleitbett Clipper

7. Kann das Begleitbett maschinell gereinigt werden?

+ Ja, das Bett kann sowohl manuell als auch maschinell gereinigt und desinfiziert werden. Die Matratze selbst darf jedoch nicht maschinell aufbereitet werden.



waschstraßen-
tauglich

8. Gibt es Referenzen, die man sich ansehen kann?

+ Ja, es können Referenzen angesehen werden.

➔ [Referenzen](#)

9. Wie lange gibt es das Produkt bereits?

+ Das CLIPPER Begleitbett ist seit Mai 2020 am Markt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN & INSTALLATION

10. Wie hoch ist die maximal zulässige Belastung der Clipper-Betten?

+ Die maximale Belastbarkeit liegt bei 150 kg und ermöglicht eine sichere Nutzung auch durch größere oder schwerere Personen.

11. Welche Maße hat das Bett im ausgeklappten Zustand?

+ Ausgeklappt misst das Bett etwa 203 × 80 × 45,2 cm (L×B×H).

12. Welche Maße hat das Bett im zusammengeklappten Zustand?

+ Eingeklappt beträgt das Maß ca. 80 × 55 × 126 cm, wodurch das Bett besonders platzsparend gelagert werden kann.

13. Wie wird das Bett richtig aufgestellt?

+ Das Clipper-Begleitbett wird aufgestellt, indem man es zunächst auf ebenem Boden platziert und die Bremsen der Rollen feststellt, damit es stabil steht. Anschließend öffnet man den Sicherheitssteckschließer und klappt die Liegeflächen nach unten, bevor das Matratzen-Mittelteil eingelegt wird. Sobald alle Flächen ausgeklappt und die Matratze korrekt eingesetzt ist, ist das Bett einsatzbereit.

FAQ – Begleitbett Clipper

14. Wie wird das Bett korrekt zusammengeklappt?

+ Das Clipper-Begleitbett wird zusammengeklappt, indem man zuerst alle Gegenstände vom Bett entfernt, anschließend das Matratzen-Mittelteil herausnimmt und senkrecht auf das Mittelteil stellt. Danach werden beide Liegeflächen vollständig hochgeklappt und der Sicherheitssteckschließer wieder geschlossen, sodass das Bett wieder in den kompakten Transportzustand übergeht.



15. Wie wird das Bett sicher bewegt?

+ Das Bett darf nicht gezogen, sondern muss geschoben werden. Die Bremsen müssen gelöst sein, und die Liegeflächen müssen hochgeklappt und verriegelt sein.



FAQ – Begleitbett Clipper

16. Sind an dem Bett Teile aus Holz verbaut?

+ Nein, am Clipper-Begleitbett sind keine Holzteile verbaut. Das Bett besteht aus einem Metallrahmen (Edelstahl elektropoliert oder Stahl pulverbeschichtet) sowie Resopal-/HPL-Liegeflächen, die besonders robust, kratz- und chemikalienbeständig sind. Ergänzt wird dies durch textile Komponenten aus Polyester mit PU-Beschichtung sowie eine hochwertige Schaumstoffmatratze. Der vollständige Verzicht auf Holz unterstützt die hohen Anforderungen an Hygiene, Reinigung und Desinfektion im Klinikalltag.

ANWENDUNGSBEREICHE & KOMPABILITÄT

17. Ist Zubehör für die Begleitbetten verfügbar?

+ Ja, wir bieten ein kleines Sortiment an Zubehör an. Dieses kann in unserem [Produktkatalog](#) eingesehen werden.

18. Kann eine Schublade am Begleitbett angebracht werden?

+ Ja, Das Clipper-Begleitbett kann optional mit einer praktischen Schublade ausgestattet werden, die zusätzlichen Stauraum für persönliche Gegenstände bietet. Die Schublade ist leichtgängig, verfügt über eine Soft-Close-Funktion und kann mit einem zusätzlich verfügbaren Zahlenschloss gesichert werden, sodass persönliche Utensilien sicher und griffbereit aufbewahrt werden können.



19. Gibt es eine Schutzhülle für das Bett?

+ Ja, zum Schutz der Clipper-Betten empfehlen wir unsere hochwertige Schutzhülle Z-CLIP01. Die Schutzhülle ist wasserabweisend, salzwasserbeständig und dank hoher Reißfestigkeit der Nähte extrem robust.



20. Kann eine Probestellung vereinbart werden?

+ Ja, Probestellung können deutschlandweit ganz unkompliziert mit unserem Vertriebspartner [TBM](#) vereinbart werden.

FAQ – Begleitbett Clipper

INDIVIDUALISIERUNG & SONDERANFERTIGUNG

21. Kann die Schutzhülle individuell bedruckt werden?

+ Ja, ab einer Abnahmemenge von 20 Stück können die Bezüge individuell auf Ihren Wunsch bedruckt werden.

22. Ist es möglich, dass Bett in verschiedenen Farben zu erhalten?

+ Ja, durch unsere hauseigene Pulverbeschichtung können wir Clipper-Betten gegen einen kleinen Aufpreis in der von Ihnen gewünschten Farbe fertigen. Hierzu können Sie gerne eine Übersicht unserer Farbpalette [anfragen](#).

SICHERHEIT & WARTUNG

23. Gibt es eine Garantie auf die Clipper-Betten?

+ Provita gewährt die gesetzliche Gewährleistung. Voraussetzung ist die sachgemäße Bedienung und Wartung. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sind von der Haftung ausgeschlossen.

24. Wie oft muss das Bett gewartet werden?

+ Mindestens einmal jährlich muss eine vollständige Funktions- und Sicherheitsprüfung durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden

25. Welche Komponente müssen bei der Wartung geprüft werden?

+ Geprüft werden müssen der Sicherheitssteckschließer, die gesamte Klappmechanik, die Rollen samt Feststellern sowie die generelle Vollständigkeit aller Bauteile.

26. Wie wird der Wartungsnachweis geführt und wo ist er zu finden?

+ Der Wartungsnachweis ist Teil der [Bedienungsanleitung](#) und wird manuell ausgefüllt. Er dokumentiert alle jährlich durchgeführten Prüfungen und Wartungsarbeiten.

27. Dürfen Reparaturen durch das Klinikpersonal durchgeführt werden?

+ Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden.

FAQ – Begleitbett Clipper

28. Wie wird die Sicherheit beim Auf- und Zuklappen des Bettes gewährleistet?

+ Die Sicherheit beim Auf- und Zuklappen des Begleitbettes wird durch ein federunterstütztes Klappsystem gewährleistet, das den Bewegungsablauf kontrolliert und ein ruckartiges Herunterklappen verhindert.

